



GLASSLOK™
XI MĂNG GỖM BỘT ƯA NƯỚC VÀ DUNG DỊCH



SẢN XUẤT TẠI MỸ

XI MĂNG GẮN KHÂU GLASS IONOMER CẢI TIẾN MỚI

- Kết dính chặt vào kim loại giúp vệ sinh sau khi tháo khâu nhanh chóng.
- Bám dính khâu chắc chắn.
- Kết dính hoàn hảo cả ở những bề mặt không sạch (dính nước bọt, máu hoặc nước).
- Độ bền nén và độ bền kéo cao.
- Chứa fluoride - bảo vệ men răng, giúp ngăn ngừa sự khử khoáng và sâu răng.



DUY NHẤT Ở  **RELIANCE®**



- Vật liệu bám dính chủ yếu trên khâu trong quá trình tháo.
- Giảm thời gian làm sạch xi măng thừa sót lại trên răng.
- Hạn chế trôi vật liệu bên dưới khâu



- Dạng bột và dung dịch trộn
- Lượng trùng hợp - quang trùng hợp hoặc hóa trùng hợp.
- + Tiết kiệm thời gian trùng hợp
- + Cho phép vật liệu trùng hợp trước khi nhiễm khuẩn bởi nước bọt.



- Hỗn hợp sánh mịn dễ trộn và đặt vật liệu.
 - Màu tự nhiên hoặc màu xanh dương.
- Đặc biệt: Màu xanh dương giúp dễ dàng làm sạch vật liệu còn sót lại trên răng, giảm thời gian vệ sinh, hạn chế trường hợp nướu tổn thương do vật liệu không được làm sạch hoàn toàn.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1 Làm sạch, đánh bóng bề mặt men răng cần gắn khâu bằng sò đánh bóng (không Flouride). Rửa sạch, thổi khô hoàn toàn.



2 Cho 2 muỗng bột và 4 giọt dung dịch lên miếng đánh thuốc và trộn kỹ.



3 Sau đó, đưa hỗn hợp vào mặt trong của khâu.



4 Tiến hành đặt khâu vào răng và loại bỏ chất gắn thừa.
Thời gian làm việc là 4 phút. Hóa trùng hợp sẽ hoàn tất sau 10 phút kể từ khi bắt đầu trộn.

Lưu ý: Để gắn rìa khâu chắc chắn hơn thì nên kết hợp quang trùng hợp.

SẢN PHẨM

MÃ SỐ

Glass Lok® Natural Shade Starter Kit* (màu tự nhiên)

GLS

Glass Lok® Blue Shade Starter Kit* (Màu xanh dương)

GLSB

Glass Lok® Starter Kit* bao gồm:

- Lọ bột 15g
- Lọ dung dịch 15cc
- Bay trộn, giấy trộn, muỗng đong

(*Ghi chú: Tất cả thành phần đều có thể mua lẻ)



DENTISTRY OF EXCELLENCE VIETNAM

Văn Phòng TP.HCM:

133 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. HCM

☎ (028) 39 57 54 77

☎ (028) 73 00 31 33

✉ sales@doevietnam.com

Văn Phòng HÀ NỘI:

12 Hạ Yên, Phường Yên Hòa,

Q. Cầu Giấy, Hà Nội

☎ (024) 32 20 21 02

🌐 www.doevietnam.com